

## 旋达<sup>®</sup>R1 动物病害检测系列

鲤春病毒血症病毒 (SVCV)<sup>RNA</sup> 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)

请于-20℃条件下保存，有效期15个月

### ◆ 产品说明

旋达<sup>®</sup>R1 动物病害检测系列可针对动物组织、饲料、粪便等样品中病原的特异核酸片段进行扩增，通过实时扩增曲线判定结果。本产品用于鲤春病毒血症病毒 (SVCV) 的检测，**检出限为 10<sup>1</sup> copies/μL 基因组 RNA。**

### ◆ 产品组成 (48 测试)

| 032072M   |                  |
|-----------|------------------|
| 试剂        | 含量               |
| A-SVCV-P  | 20μL × 8 管 × 6 排 |
| NG-P      | 100μL × 2 支      |
| PG-SVCV-P | 100μL × 1 支      |

### ◆ 适用仪器

Gentier 32R、Gentier 48E/48R、Gentier mini、CFX 96等实时荧光 PCR 仪。

### ◆ 自备耗材和仪器

①冰盒；②移液器 (0.5-10μL, 10-100μL, 100-1000μL) 及配套灭菌吸头；③离心机；④涡旋混匀器；⑤金属浴；⑥均质机、搅拌机或研钵等研磨器具；⑦电子天平。

### ◆ 注意事项

1. 本试剂检测灵敏度高。为了防止污染，实验要分区操作。
  - 1) 第一区：样本制备区。
  - 2) 第二区：模板添加区。
  - 3) 第三区：扩增及产物分析区。

★ 分区之间最好进行物理性隔离，避免人为因素造成的污染。
2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套，不同区域独立使用工具，需更换手套和实验服。
3. 严格按照操作步骤操作，试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4. 反应液中的成分对光敏感，应**避光保存**。试剂使用前要完全解冻，但避免反复冻融，推荐使用前离心30秒。
5. 反应结束后，扩增管请置于密封袋内丢弃，当日清理，开盖易造成气溶胶污染，禁止开盖。
6. 不同批号试剂请勿混合使用，在有效期内使用。

### ◆ 样品处理

参照《GB / T 15805.5-2018 鲤春病毒血症诊断规程》或其他标准处理样品，制备的样本保存待用。详细步骤请按照标准操作。

### ◆ 实验操作

1. 模板制备 (样本制备区)
 

建议使用水生动物病原体基因组DNA/RNA提取试剂盒 (FAST) 等商品化试剂盒，具体过程详见产品说明书。
2. 添加模板 (模板添加区，放置于冰盒上进行)
 

剪下所需测试数的已含有反应液的 PCR 管，放置在室温待解冻后，离心 30 秒后打开管盖，向每管反应液中分别加入 5μL 模板，顺序为 NG、待测样品模板、PG-SVCV-P。盖好管盖后，涡旋混匀 30s，离心 1min，立即进行 PCR 扩增反应。
3. 扩增反应 (扩增及产物分析区)

使用荧光定量 PCR 仪，荧光基团选择 FAM，淬灭基团选择 NONE。

按下列条件设置扩增反应：

| PCR 循环 |      |        | 荧光收集位点 |
|--------|------|--------|--------|
| 50℃    | 5分钟  | 1 个循环  | —      |
| 95℃    | 5 分钟 | 1 个循环  | —      |
| 95℃    | 15 秒 | 45 个循环 | —      |
| 60℃    | 30秒  |        | ※      |

其他仪器请参照仪器说明书进行设置。

4. 基线和阈值设定

基线调整取 3-15 个循环的荧光信号，阈值线应超过阴性对照扩增曲线的最高点。


◆ 结果判定

检测样品无 Ct 值或  $\geq 45$  或无 Ct 值，曲线为直线或轻微斜线，无“S”型扩增曲线，可报告样品阴性，不含有鲤春病毒血症病毒（SVCV）或含量低于检出限；

检测样品  $Ct \leq 40$ ，曲线呈“S”型扩增曲线，可直接报告样品阳性，含有鲤春病毒血症病毒（SVCV）；

检测样品  $40 < Ct < 45$ ，应调整模板浓度，重做实时荧光 PCR。再次扩增后的样品检测 Ct 值  $< 45$ ，则可判定样品含有鲤春病毒血症病毒（SVCV）；再次扩增后的样品检测 Ct 值  $\geq 45$ ，则可判定该样品不含有鲤春病毒血症病毒（SVCV）或含量低于检出限。

★ NG 反应为平滑直线，PG 反应为“S”型扩增曲线，此次检测结果有效，否则无效。如重复检测结果仍为无效，请与技术支持人员联系。

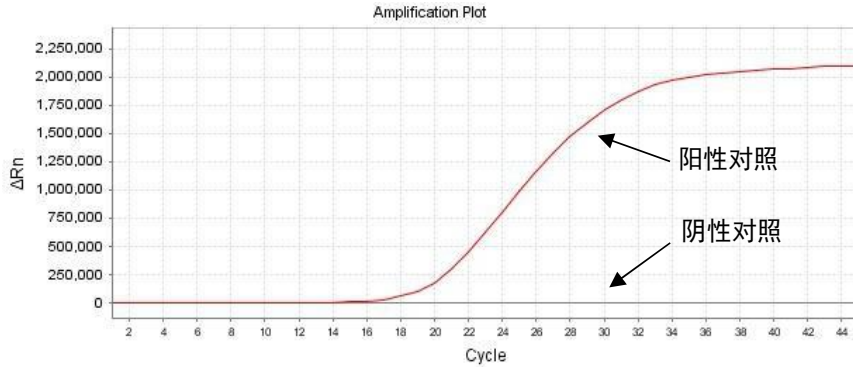

参考结果图

◆ 企业信息

广州双螺旋基因技术有限公司

网址：www.dhelix.cn

电话：020-85671013

传真：020-34037175

地址：广州国际生物岛螺旋四路 7 号标准产业单元二期第三栋第三层 302 单元